



CR04

Andador de exterior

MANUAL DE USUARIO

Ref. BSDPAL9100FB - BSDPAL9100FREFB

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA.

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nuevo **andador CR04 FM, CR04 FP o CR04 FM R8** que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 – Partes	4
2 – Descripción	4
3 – Características técnicas	5
4 – Mantenimiento y limpieza	6
5 – Instalación del andador	7
6 – Información de uso y seguridad	7
8 – Uso del andador	10
8 – Garantía	11

1. PARTES



2. DESCRIPCIÓN

ANDADOR LIGERO CON ASIENTO

Los andadores con frenos CR04, incorporan un sistema de frenos manuales que permiten un control total por parte del usuario y se caracterizan por estar fabricados en aluminio, un material ligero, resistente y muy duradero. Dispone de un

cómodo asiento regulable bajo el cual se sitúa una cesta de ropa y una barra acolchada como respaldo para apoyar cómodamente la espalda y tiene un sistema de fácil plegado para facilitar su transporte.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CR04 FM



CR04 FP



CR04 FM R8

Medidas	CR04 FP	CR04 FM
Ancho total	65,5 cm	64 cm
Ancho entre ruedas traseras	36 cm	45,5 cm
Profundidad total	60/67 cm	67/73,5 cm
Profundidad plegado	26,5 cm	31 cm
Alto total (regulable)	80,5/97 cm	82/99 cm
Alto del asiento al suelo (regulable)	50/57 cm	50/57 cm

Peso	CR04 FP	CR04 FM
Peso total	7,15 kg	7,30 kg
Peso máximo soportado	100 kg	100 kg

Material	Aluminio	Color	Azul / Rojo
----------	----------	-------	-------------

Asiento	
Ancho del asiento	37 cm
Profundidad del asiento	25 cm
Tipo de asiento	Abatible
Material del asiento	Acolchado
Color del asiento	Negro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Respaldo


Ancho del respaldo	48 cm
Tipo de respaldo	Plegable
Material del respaldo	Barra acolchada

Ruedas	CR04 FP	CR04 FM	CR04 R8
Medidas ruedas delanteras	Ø15 cm	Ø15 cm	Ø20 cm
Medidas ruedas traseras	Ø15 cm	Ø15 cm	Ø20 cm
Ancho ruedas delanteras	2,5 cm	2,5 cm	4 cm
Ancho ruedas traseras	2,5 cm	2,5 cm	4 cm
Tipo de ruedas	Macizas	Macizas	Macizas
Número de ruedas delanteras	2	2	2
Número de ruedas traseras	4	2	2


Otras características	CR04 FP	CR04 FM
Cesta	Cesta de tela	Cesta de tela
Medidas cesta (ancho/alto/profundo)	36/18/19 cm	36/18/19 cm
Peso máximo cesta	8 kg	8 kg
Plegable	Sí	Sí
Tipo de freno	Freno presión	Freno maneta y bloqueo parking
Portabastón	Sí	Sí




Pomo de ajuste de altura

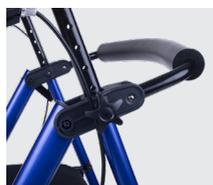

Respaldo

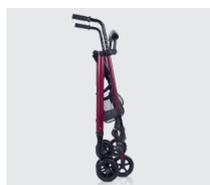

Andador CR04 FP plegado

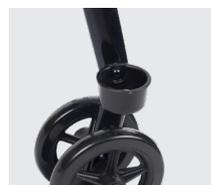

Porta bastón

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Hacer un mantenimiento regular al andador.
- Limpie el chasis con un paño húmedo para quitar la suciedad.
- Guarde el andador en el interior de su hogar por la noche. No lo exponga a aire salado o ambientes hostiles. Si lo expone, comprobar los daños y limpiarlo antes de utilizarlo.
- Semanalmente comprobar las ruedas, si giran correctamente, si no tienen pelusas o algo que afecte a su funcionamiento. El chasis que no esté dañado, que no tenga grietas, ni este desoldado en algún lugar. Que los frenos funcionen de forma óptima. En caso contrario llevar al servicio técnico para su ajuste.

5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

5.1. SAQUE EL ANDADOR DE LA CAJA

Para empezar a utilizar el andador, saque el andador de la caja con cuidado. Abrirlo empujando hacia abajo las bisagras del mecanismo de plegado.

5.2. MONTAJE DE LAS RUEDAS

Ruedas delanteras

Las ruedas delanteras son las que llevan horquillas (ambas ruedas están unidas), introduzca la barra de aluminio a su andador, una vez haya regulado su altura, deberá fijarla con el embellecedor.



Ruedas traseras

Las ruedas traseras son aquellas que no llevan horquillas, repita el mismo paso anterior.


5.3. MONTAJE DE PUÑOS Y EMPUÑADURA DE FRENO

Introduzca la barra de aluminio igual que en el paso anterior, pero esta vez por la zona superior de su andador. Haga lo mismo que se muestra en la imagen.



5.4. POMO DE AJUSTE DE ALTURA Y TORNILLO

Para fijar la altura de la parte superior de su andador, introduzca el puño por el orificio visible, después deberá de dar vueltas sobre el eje del pomo para fijar la altura adecuada.

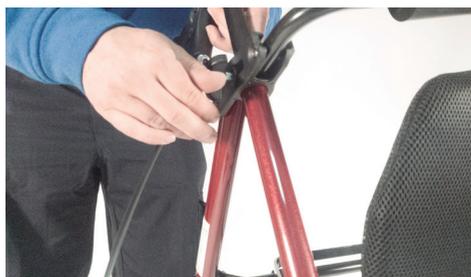

5.5. MONTAJE DE LA CESTA

Ponga la cesta en ambos extremos, cerca de la bisagra, mecanismo de plegado, encaje los botones con él los restantes, sabrá si se ha colocado un botón cuando escuche "clic".



5.6. COLOCAR EL PORTA BASTÓN

En su andador verá que en la parte derecha tiene como una redonda que sobresale, ahí irá colocado su porta bastón.



5.7. COLOCAR CORRECTAMENTE EL SISTEMA DE FRENOS

Los cables que conectan la empuñadura con los frenos, para que a usted le sea más cómodo, colóquelo de la siguiente manera.



PRECAUCIÓN

Una vez el andador esté montado, debe revisar y verificar que todas las piezas están bien colocadas y el producto está en condiciones para su uso. Si aprecia que alguna pieza no queda del todo bien colocada, no utilice el andador y póngase en contacto con su ortopedia.

6. INFORMACIÓN DE USO Y SEGURIDAD



PRECAUCIÓN

No usar el andador como silla de ruedas o silla de transporte.

- Solo usar el asiento para estar sentado y quieto.
- Nunca sentarse y empujar con los pies.
- No utilizar para subir o bajar escalas, escaleras mecánicas o cintas transportadoras.

Consulte siempre con su médico o terapeuta para determinar el uso y ajuste adecuado de la regulación de la altura para obtener el máximo apoyo y la correcta activación del freno.

Asegúrese que ambos pomos de ajuste de altura estén bien apretados y que los puños están a la misma altura. Pruebe la estabilidad antes de usarlo.

Asegúrese que el andador está completamente abierto, el asiento en posición y las bisagras desplegadas correctamente.

Comprobar que los ajustes de altura sean los correctos y que las ruedas se mueven libremente antes de utilizarlo.

Respete el límite de peso del producto.

Reemplace las ruedas cuando estén desgastadas o dañadas. Comprobar las ruedas delanteras semanalmente para detectar signos de daños.

Suspenda el uso del andador si comprueba que las ruedas están flojas y vuelva al lugar donde las compro para ajustarlo.

No exponer a temperaturas extremas (muy altas o muy bajas), humedad o que se moje, para evitar deformaciones de las piezas de plástico.

Todas las ruedas tienen que estar en contacto con el suelo a la hora de utilizar el andador para que esté equilibrado.

Para evitar que vuelque:

- No intente alcanzar objetos si tiene que moverse hacia adelante mientras esté sentado en el andador.
- No cuelgue nada en el andador.
- El respaldo debe estar siempre en su sitio y no está diseñado para soportar todo el peso corporal.
- Si quiere alcanzar o recoger algún objeto debe colocar ambos pies firmemente en el suelo.
- No añadir más peso al andador cuando esté sentado.
- No use el asiento si se encuentra en una pendiente o terreno irregular.
- La cesta tiene una capacidad de 5 Kg. Y los objetos no deben sobresalir de ella.
- Para frenar el andador temporalmente, presione hacia abajo las dos empuñaduras a la vez.

7. USO DEL ANDADOR

7.1. ¿COMO USAR LOS FRENOS?

Para frenar y que no vuelque, debe de colocar las manos en las empuñaduras de frenos y ejercer presión en ambas a la vez, así lograra frenar sin volcar y detendrá su andador por completo.



7.2. COMO UTILIZAR EL POMO DE AJUSTE DE ALTURA

Para regular la altura debe de extraer el pomo de ajuste y subir o bajar la barra a su gusto, para fijar la altura deseada, deberá de volver a introducir el pomo y enroscar sobre su eje, asegúrese de que la altura está bien fijada.



7.3. COMO REGULAR Y FIJAR UNA ALTURA DEL ANDADOR

Ruedas delanteras

Para regular y fijar la altura de las dos ruedas traseras, deberá de extraer ambos embellecedores. Para extraer los embellecedores, presione en el clic de anclaje y extráigalo. Ahora regule la altura a su gusto. Para fijar la altura, vuelva a introducir el embellecedor.

Ruedas traseras

Para regular y fijar la altura, deberá de presionar en la bola que sobresale de la barra de aluminio y bajar o subir a su gusto, sabrá que está fijado cuando escuche un clic.



7.4. COMO PLEGAR EL ANADADOR

Para plegar el andador, abra la cesta, coja de la base que sostiene el asiento y estire hacia arriba.



8. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto está defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su número de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Representante Europeo.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Lote.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Referencia del producto.



Datos del fabricante.



Número de serie.



Fecha de fabricación.



Producto sanitario conforme con el MDR.

Manual de usuario

Andador CR04 FM · CR04 FP · CR04 FM R8

V4 · 08/04/2022